

Gebruiksaanwijzing

MijnBitje thuisafdrukset

Met deze instructie wordt u geholpen bij het maken van de afdruk van de bovenkaak.

Leg de bakjes met pasta eerst twee uur in de koelkast voor een optimaal resultaat.



Voorbeeld: Groene lepel is een goede afdruk. Bij de witte lepel is er te weinig ingebeten.

Stel dat jou afdruk er uit ziet zoals de witte lepel. Stuur ons dan een mail dan sturen wij kosteloos een nieuwe afdrukset op.

1 Ga voor een spiegel staan en pas de afdruklepel.



2 Haal de pasta uit de koelkast en kneed de twee kleuren **binnen 20 seconden** tot een egale kleur.



3 Maak een rol van de pasta en verdeel dit over de afdruklepel. Druk deze vervolgens zachtjes aan. Probeer zoveel mogelijk afdruk materiaal aan de voorkant van de lepel neer te leggen, zie afbeelding.



4 Plaats de afdruklepel direct in uw mond. Druk met uw vingers de lepel recht naar boven tot deze niet verder kan.

Al uw tanden moeten de onderkant van de lepel raken.



5 Trek uw bovenlip over de lepel heen en masseer uw wangen. Belangrijk is wel dat de lepel op zijn plek blijft. Wacht 3 minuten totdat de pasta uitgehard is.

6 Voel met uw vingers of de pasta is uitgehard en niet meer vervormd. Als dit het geval is kunt u door het handvat heen en weer te bewegen de lepel uit uw mond nemen.

Na het nemen van de afdruk kunt u deze samen met het **bestelformulier** retourneren naar het volgende adres:



MijnBitje

Henriette van Lijndenlaan 6
3703AS Zeist